

**Infinity**<sup>∞</sup>**orange**<sup>®</sup>  
BY MOOG<sup>®</sup>

ENTRADA 

SALIDA 

1.0 ml/hr  
RATE E III F 

ENCENDIDO/  
APAGADO

TIPO DE  
ALIMENTO

BORRAR

CEBAR

VOLUMEN/  
TOTAL

+

INICIAR/  
PAUSAR

VELOCIDAD/  
DOSIS

-



Para obtener información, vaya a  
[www.infinityfeedingpump.com](http://www.infinityfeedingpump.com)

**INSTRUCCIONES DE USO:** / use únicamente  
los equipos de alimentación Infinity.

1. Abra la puerta. Ubique el tubo de silicona alrededor de la rueda de la bomba y estírelo levemente. Asiente el cartucho en la bomba. Cierre la puerta.
2. Encienda la bomba con la tecla **ON/OFF (encendido/apagado)**. Verifique todos los segmentos de la pantalla y que suene una alarma.
3. Confirme la configuración viendo o ajustando el caudal, la dosis y el tipo de alimento.
4. Establezca el caudal usando las teclas **+ o -**.
5. Pulse la tecla **RATE/DOSE (velocidad/dosis)**. Establezca la dosis usando las teclas **+ o -**.
6. Pulse la tecla **FOOD TYPE (tipo de alimento)**. Establezca el alimento como fórmula o leche usando las teclas **+ o -**.
7. Pulse la tecla **VOL/TOTAL (volumen/total)** para mostrar el volumen. Si lo desea, borre el volumen usando la tecla **CLEAR (borrar)**. Pulse la tecla **VOL/TOTAL (volumen/total)** nuevamente para mostrar el volumen total. Si lo desea, borre el volumen usando la tecla **CLEAR (borrar)**.
8. Pulse y mantenga oprimida la tecla **PRIME (cebar)** para llenar el equipo de líquido. Cuando el equipo esté lleno, suelte la tecla **PRIME (cebar)**.
9. Pulse la tecla **RUN/PAUSE (iniciar/pausar)** para iniciar la alimentación. Vuelva a pulsarla si desea hacer una pausa.
10. Pulse la tecla **ON/OFF (encendido/apagado)** para apagar el equipo. Cuando se apaga, la bomba mantiene el caudal, la dosis y el volumen total (el volumen administrado se restablece en 0 y el tipo de alimento se restablece en fórmula).
11. Recargue la batería usando ÚNICAMENTE el adaptador de CA/cargador Infinity.

**ALARMAS** (Encuentre más detalles en el manual del operador).

- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (confirmar dosis y tipo de alimento)** - confirme que la dosis y el tipo de alimento estén programados correctamente.
- **LOAD SET (cargar equipo)** - el equipo no se cargó correctamente (vuelva a cargarlo).
- **LOW BATT (batería baja)** - se está agotando la batería (enchufe el adaptador de CA/cargador).
- **MAX (máximo)** - se alcanzó el límite permitido de caudal o dosis.
- **NO FLOW IN / OUT (no hay flujo de entrada ni de salida)** - la vía del líquido está obstruida (desobstrúyala).
- **NO FOOD (no hay alimento)** - la bolsa o el equipo está vacío (vuelva a llenarlo).
- **PUSH RUN TO FEED (pulsar ejecutar para iniciar la alimentación)** - la bomba no se utilizó durante más de 2 minutos (hágala funcionar o apáguela).
- **SHUT DOOR (cerrar la puerta)** - la puerta está abierta.
- **ER01 - ER99 (error 1-99)** - apague la bomba y vuelva a encenderla; si el error persiste, consulte a mantenimiento.



Hable en directo con un representante  
clínico de Moog, disponible las 24  
horas del día, los 7 días de la semana,  
llamando al **800.970.2337**.

**MOOG**® Enhancing Healthcare.  
Enriching Lives.™

Infinity® is a registered trademark of Zevex, Inc. Moog® is a  
registered trademark of Moog, Inc. © 2020 Moog, Inc. Moog Medical,  
4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-80673 Rev. A