



Plan de alimentación

Llenar la
bolsa con:

 ml

Caudal:

 ml/hr

Dosis:

 ml

Recargar la
bolsa con:

 ml

Recargar
la bolsa
cada:

 horas

Tiempo
máximo de
colgado:

 horas

Ayuda y recursos adicionales

A quién llamar

Si tiene preguntas o inquietudes médicas: llame al equipo médico del paciente o a su médico de atención primaria.

Si necesita insumos: comuníquese con su proveedor de atención en el hogar para hacer un pedido de insumos. Comuníquese con su proveedor de atención en el hogar llamando al número que figura a continuación al menos con ____ días de antelación para no quedarse sin insumos. Guarde siempre el equivalente a ____ días extra de insumos y fórmula en caso de emergencia.

Proveedor de atención en el hogar:

Número de teléfono:

¿Qué sucede si la bomba emite una alarma?

1. Lea el mensaje que aparece en la pantalla y escríbalo.
2. Apague la alarma presionando la tecla **RUN/PAUSE** (ejecutar/pausar).
3. Siga la tabla para la solución de problemas que puede encontrar en infinityfeedingpump.com o en el manual del usuario.
4. Si la bomba continúa emitiendo la alarma, comuníquese con su proveedor de atención en el hogar para solicitarle ayuda o con el servicio de asistencia al cliente de Moog llamando al **800.970.2337**.


Notas adicionales:

Instrucciones de consulta rápida


Estas instrucciones no sustituyen el manual del operador. Asegúrese de leer el manual del operador detenidamente antes de hacer funcionar la bomba. En el manual del operador puede encontrar más información, entre la que se incluye la programación de los intervalos.

Cebado y carga del juego desechable


Si usa una mochila

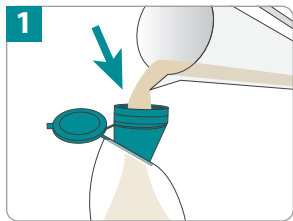


1 Sostenga el embudo de la bolsa en forma vertical y vierta la fórmula de alimentación. Cierre bien la tapa.

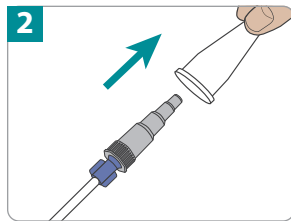


2 Retire la cubierta protectora del conector de la sonda de alimentación.

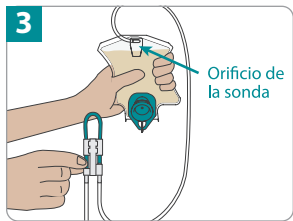

3 **Cebe el equipo manualmente y elimine el aire** dando vuelta la bolsa, de modo que quede al revés, e inclinándola para mantener el aire en el orificio de la sonda. Apriete suavemente el tubo de color verde azulado debajo del símbolo "O". Al mismo tiempo que aprieta el tubo, apriete también suavemente la bolsa para facilitar el movimiento del líquido. Mantenga esta posición hasta que la fórmula llegue al conector de la sonda de alimentación.

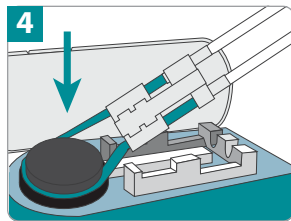

4 Enlace el tubo de silicona alrededor de la rueda de la bomba y estírelo levemente.

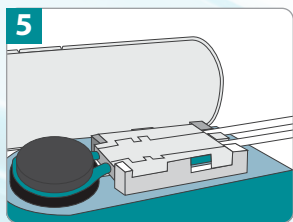


5 Asiente el cartucho dentro de la bomba y cierre la puerta.




6 Coloque la bomba dentro de la mochila y sujétela con las correas.


Si usa un portasuero

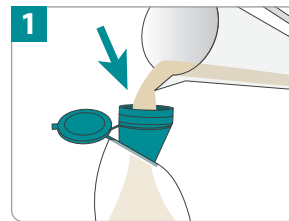

1 Sostenga el embudo de la bolsa en forma vertical y vierta la fórmula de alimentación. Cierre bien la tapa y cuelgue la bolsa.

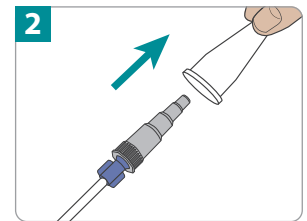


2 Retire la cubierta protectora del conector de la sonda de alimentación.

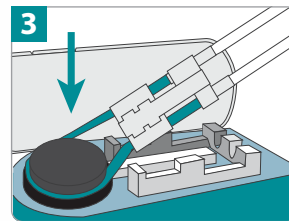


3 **Si va a realizar el cebado manualmente, avance al paso 6. Si va a usar la bomba para el cebado, continúe con el paso 5:**

Enlace el tubo de silicona alrededor de la rueda de la bomba y estírelo levemente.

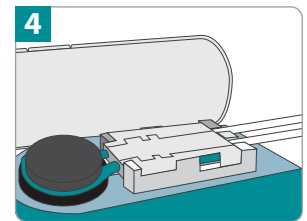


4 Asiente el cartucho dentro de la bomba y cierre la puerta.

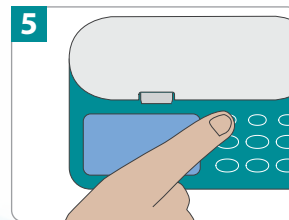

5 Encienda la bomba manteniendo presionada la tecla **ON/OFF** (encendido/apagado) hasta que la bomba emita un pitido.

Luego, mantenga presionada la tecla **PRIME** (cebar) hasta que la fórmula llegue al conector de la sonda de alimentación.

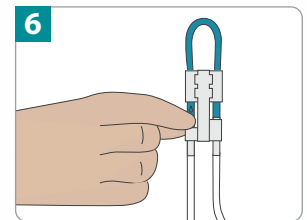

6 **Para realizar el cebado manualmente**, apriete suavemente el tubo de color verde azulado debajo del símbolo "O". Al mismo tiempo que aprieta el tubo, apriete también suavemente la bolsa para facilitar el movimiento del líquido. Mantenga esta posición hasta que la fórmula llegue al conector de la sonda de alimentación.

Cuando finalice el cebado, consulte los pasos 3 y 4 para cargar el juego en la bomba.

Programación y uso de la bomba

Encienda la bomba

Mantenga presionada la tecla **ON/OFF** (encendido/apagado) durante 1.5 segundos para encender la bomba. La pantalla mostrará el último caudal programado.

ON/OFF

Para programar el caudal (la velocidad con la que funciona la bomba)

Presione la tecla **RATE/DOSE** (caudal/dosis) hasta que aparezca "RATE" (caudal) en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla. Use las teclas **+** y **-** para programar el caudal.

RATE/DOSE

+

-

Para programar la dosis (qué cantidad de alimento se debe administrar)

Presione la tecla **RATE/DOSE** (caudal/dosis) hasta que aparezca "DOSE" (dosis) en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla. Use las teclas **+** y **-** para programar la dosis.

RATE/DOSE

+

-

Para programar una dosis infinita (configuración solo del caudal)

Presione la tecla **RATE/DOSE** (caudal/dosis) hasta que aparezca "Dose" (dosis) en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla y mantenga presionada la tecla **+** hasta que en la pantalla se lea "INF" (infinita).

RATE/DOSE

+

Inicie la bomba

Presione la tecla **RUN/PAUSE** (ejecutar/pausar) para iniciar la bomba.

RUN/PAUSE

Cuando termine la alimentación

Cuando haya terminado la alimentación, presione la tecla **ON/OFF** (encendido/apagado) durante 1.5 segundos para apagar la bomba.

ON/OFF

Para borrar la configuración

Presione la tecla **CLEAR** (borrar) para restablecer el valor que se muestra. Mantenga presionada la tecla **CLEAR** (borrar) durante 3 segundos para restablecer al mismo tiempo los valores del caudal, la dosis, el intervalo de alimentación y el volumen administrado.


CLEAR

Ver el volumen administrado


Presione la tecla **VOL/TOTAL** (volumen/total) para ver el volumen administrado en la alimentación en curso. Presione la tecla nuevamente para que se muestre el volumen total acumulado que se administró desde que se restableció por última vez el volumen total.

VOL TOTAL


Limpieza de la bomba

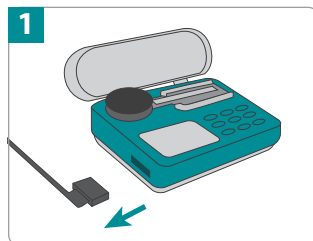


Desenchufe el adaptador de CA y el cargador Infinity de la bomba y apague la bomba.

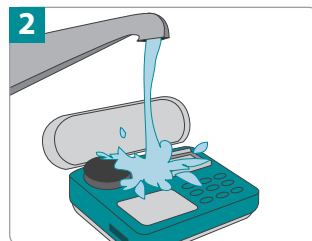

Enjuague la bomba sosteniéndola bajo un chorro de agua tibia. La bomba también se puede limpiar con detergente común para vajilla y una esponja que no sea abrasiva o un paño suave.

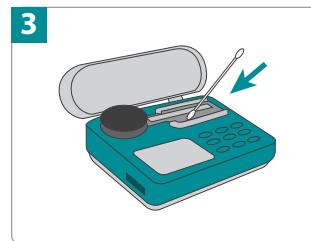

Use un hisopo de algodón para limpiar los canales del cartucho y para quitar los residuos que pueda haber en los pasadores de la rueda de la bomba.

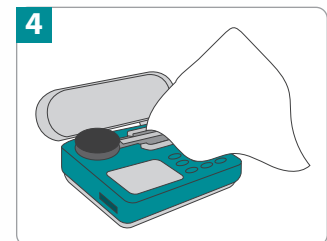

Seque con un paño limpio. Asegúrese de que la bomba Infinity esté completamente seca antes de enchufarla en un tomacorriente eléctrico.



Hable en vivo con un representante clínico de Moog, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, si tiene preguntas relacionadas con la bomba o necesita ayuda para solucionar problemas.

Asistencia clínica y al cliente **800.970.2337**
Visite infinityfeedingpump.com para obtener más información

Infinity® is a registered trademark of Zevex, Inc.
Moog® is a registered trademark of Moog, Inc.
© 2020 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane,
Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-80537-002 Rev. A

MOOG®
Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™