

Infinity[®]
orange[®]
BY MOOG[®]



开/关

食物类型

清除

预充

总输注量

+

运行/
暂停

速度/
剂量

-



此泵配有自动预充选项

www.infinityfeedingpump.com

使用指南/仅限使用 Infinity 喂料输送装置

1. 开门。将硅胶管缠绕在泵轮上，轻轻拉伸。将卡套放入泵内。关门。
2. 利用 **ON/OFF 键** 打开输注泵。确认所有显示区段和声音报警。
3. 查看/调整速度、剂量和食物类型，确认设置。
4. 利用 **+** 和 **-** 键设置速度。
5. 按下 **RATE/DOSE 键**。利用 **+** 和 **-** 键设置剂量。
6. 按下 **FOOD TYPE 键**。利用 **+** 和 **-** 键设为配方奶或母乳。
7. 按下 **VOL/TOTAL 键**，显示输注量。需要时利用 **CLEAR 键** 清除。再按一次 **VOL/TOTAL 键**，显示总输注量。需要时利用 **CLEAR 键** 清除。
8. 按住 **PRIME 键**，向输注装置注入液体。注入液体时松开 **PRIME 键**。注意：此泵配有自动预充选项。详情请参见《操作手册》。
9. 按下 **RUN/PAUSE 键** 运行。再按一次暂停。
10. 按下 **ON/OFF 键** 关闭（当关闭时，输注泵会保留速度、剂量、喂料间隔和总输注量）。
11. 只能用 Infinity 交流适配器/充电器给电池充电。

报警（更多详情请参阅《操作手册》）

- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (确认剂量和食物类型)** - 确认剂量和食物类型设置是否恰当
- **LOAD SET (装载输注装置)** - 输注装置装载不正确（重新装载）
- **LOW BATT (电量低)** - 电池电量低（插入交流适配器/充电器）
- **MAX (最大值)** - 达到设定速度或剂量的限值
- **NO FLOW IN / OUT (无流入/流出)** - 液体路径堵塞（消除堵塞）
- **NO FOOD (无食物)** - 储液袋或输注装置已空（补液）
- **PUSH RUN TO FEED (按下运行喂料)** - 输注泵未使用超过 2 分钟（操作或关闭）
- **SHUT DOOR (关门)** - 门已打开
- **ER01 - ER99** -（关闭输注泵后再打开；如果错误再次出现，请送修）



请随时（一天 24 小时、一周 7 天）致电 **800.970.2337**，
咨询 Moog 代表

MOOG® Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Infinity® 和 Infinity® Orange® 是 Zevex, Inc. 的注册商标。Moog® 是 Moog, Inc. 的注册商标。© 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-80673-008 Rev. B