

Infinity[®]
orange[®]
BY MOOG[®]



MARCHE/
ARRÊT

TYPE
D'ALIMENT

EFFACER

AMORCER

VOLUME
TOTAL

+

FONCTIONNEMENT
/ PAUSE

DÉBIT /
DOSE

-



Diese Pumpe ist mit einer automatischen
Vorfülloption ausgestattet
www.infinityfeedingpump.com

GEBRAUCHSANWEISUNG / Nur Infinity
Ernährungssets verwenden

1. Klappe öffnen. Den Silikon Schlauch um das Pumpenrad positionieren und leicht spannen. Die Kassette in die Pumpe einsetzen. Klappe schließen.
2. Pumpe über die Taste **ON/OFF (EIN/AUS)** einschalten. Alle Anzeigesegmente und akustischen Alarmsignale überprüfen.
3. Einstellungen durch Überprüfen/Anpassen von Rate, Dosis und Nahrungsart bestätigen.
4. Die Rate unter Verwendung der Tasten **+** oder **-** einstellen.
5. Die Taste **RATE/DOSE (RATE/DOSIS)** drücken. Die Dosis mithilfe der Tasten **+** oder **-** einstellen.
6. Taste **FOOD TYPE (NAHRUNGSART)** drücken. Mit den Tasten **+** und **-** auf Formulanahrung oder Milch einstellen.
7. Die Taste **VOL/TOTAL (VOL/GESAMT)** drücken, um das Volumen anzuzeigen. Falls gewünscht mit der Taste **CLEAR (LÖSCHEN)** löschen. Die Taste **VOL/TOTAL (VOL/GESAMT)** erneut drücken, um das Gesamtvolumen anzuzeigen. Falls gewünscht mit der Taste **CLEAR (LÖSCHEN)** löschen.
8. Die Taste **PRIME (VORFÜLLEN)** gedrückt halten, um das Set mit Flüssigkeit zu befüllen. Wenn es befüllt ist, die Taste **PRIME (VORFÜLLEN)** loslassen. Hinweis: Diese Pumpe ist mit einer automatischen Vorfülloption ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
9. Die Taste **RUN/PAUSE (AUSFÜHREN/ANHALTEN)** zum Ausführen drücken. Zum Anhalten erneut drücken
10. Zum Ausschalten die Taste **ON/OFF (EIN/AUS)** drücken (wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, werden Rate, Dosis, Ernährungsintervall und Gesamtvolumen gespeichert).
11. Den Akku NUR mit dem Infinity AC-Adapter/ Ladegerät aufladen.

ALARME (Weitere Einzelheiten sind dem Bedienungshandbuch zu entnehmen)

- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (DOSIS UND NAHRUNGSART BESTÄTIGEN)** - Bestätigen, dass Dosis und Nahrungsart angemessen programmiert sind
- **LOAD SET (SET LADEN)** - Set nicht ordnungsgemäß geladen (erneut laden)
- **LOW BATT (AKKU NIEDRIG)** - Niedriger Akkuladestand (an AC-Adapter/Ladegerät anschließen)
- **MAX** - Die Grenze der programmierten Rate oder Dosis wurde erreicht
- **NO FLOW IN / OUT (KEIN EINFLIEßEN/AUSFLIEßEN)** - Flüssigkeitspfad blockiert (freigeben)
- **NO FOOD (KEINE NAHRUNG)** - Beutel oder Set ist leer (neu befüllen)
- **PUSH RUN TO FEED (ZUR ERNÄHRUNG AUF AUSFÜHREN DRÜCKEN)** - Pumpe über mehr als 2 Minuten nicht in Betrieb (ausführen oder ausschalten)
- **SHUT DOOR (KLAPPE SCHLIEßEN)** - Die Klappe ist offen
- **ER01 - ER99** - (Pumpe ausschalten und wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, an den Service wenden)



Sprechen Sie persönlich mit einem
Vertreter von Moog Clinical unter
800-970-2337, der 24 Stunden am Tag und
7 Tage die Woche für Sie erreichbar ist.

MOOG® Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Infinity® et Infinity® Orange® sont des marques déposées de Zevex, Inc. Moog® est une marque déposée de Moog, Inc. © 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 É.-U. LS-80673-004 Rev. B