

Infinity[∞]**orange**[®]
BY MOOG[®]



ВКЛ/ВЫКЛ

ТИП ПИТАНИЯ

ОЧИСТИТЬ

ЗАПОЛНИТЬ

СУММАРНЫЙ
ОБЪЕМ

+

ПУСК/ПАУЗА

СКОРОСТЬ/
ДОЗА

-

1. Откройте дверцу. Поместите силиконовую трубку вокруг колеса насоса с небольшим натяжением. Вставьте кассету в насос. Закройте дверцу.
2. Включите насос кнопкой **ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)**. Проверьте все сегменты дисплея и звуковые сигналы тревоги.
3. Подтвердите настройки путем просмотра или коррекции скорости, дозы и типа питания.
4. Установите скорость с помощью кнопок «+» и «-».
5. Нажмите кнопку **RATE/DOSE (СКОРОСТЬ/ДОЗА)**. Установите дозу с помощью кнопок «+» и «-».
6. Нажмите кнопку **FOOD TYPE (ТИП ПИТАНИЯ)**. С помощью кнопок «+» и «-» выберите смесь или грудное молоко.
7. Нажмите кнопку **VOL/TOTAL (СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ)** для отображения объема. При необходимости удалите значение параметра нажатием кнопки **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**. Повторно нажмите кнопку **VOL/TOTAL (СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ)**, чтобы вывести на дисплей суммарный объем. При необходимости удалите значение параметра нажатием кнопки **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**.
8. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **PRIME (ЗАПОЛНИТЬ)**, чтобы заполнить систему жидкостью. После заполнения отпустите кнопку **PRIME (ЗАПОЛНИТЬ)**.
Примечание. Этот насос оборудован функцией автоматического заполнения. Обратитесь за подробными сведениями к руководству оператора.
9. Нажмите кнопку **RUN/PAUSE (ПУСК/ПАУЗА)** для запуска насоса. Для временной остановки повторно нажмите эту кнопку.
10. Нажмите кнопку **ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)** для выключения (после выключения насос сохраняет параметры скорости, дозы, интервала питания и суммарного объема).
11. Заряжайте батарею ТОЛЬКО зарядным устройством или сетевым адаптером Infinity.

- ALARMS (СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ)** (дополнительные сведения даны в руководстве оператора)
- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (ПОДТВЕРДИТЕ ДОЗУ И ТИП ПИТАНИЯ)** - подтвердите правильность программирования параметров дозы и типа питания
 - **LOAD SET (ЗАГРУЗИТЬ СИСТЕМУ)** - система загружена неправильно (перезагрузите)
 - **LOW BATT (БАТАРЕЯ РАЗЯРЖЕНА)** - батарея разряжена (подключите сетевой адаптер или зарядное устройство)
 - **MAX (МАКС)** - достигнут заданный предел скорости или дозы
 - **NO FLOW IN / OUT (НЕТ ВХОДЯЩЕГО/ ВЫХОДЯЩЕГО ПОТОКА)** - ток жидкости перекрыт (устраните препятствие)
 - **NO FOOD (НЕТ ПИТАНИЯ)** - мешок или система пусты (заполните)
 - **PUSH RUN TO FEED (НАЖМИТЕ «ПУСК», ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПИТАНИЕ)** - насос не работал более 2 минут (возобновите работу или выключите)
 - **SHUT DOOR (ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ)** - дверца открыта
 - **ER01-ER99** - (выключите и опять включите насос; если ошибка сохранится, см. раздел с описанием технического обслуживания)



К представителю Moog Clinical
можно обращаться круглосуточно
без выходных дней по телефону
горячей линии **800.970.2337**

MOOG[®] Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Infinity® и Infinity® Orange® являются зарегистрированными товарными знаками компании ZeveX, Inc. Moog® является зарегистрированным товарным знаком компании Moog, Inc. © 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 ZeveX Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA (США). LS-80673-006 Rev. B