

**Infinity**<sup>∞</sup>**orange**<sup>®</sup>  
BY MOOG<sup>®</sup>



ON/OFF

FOOD TYPE

CLEAR

PRIME

KABUANG  
DAMI

+

RUN/PAUSE

RATE/  
DOSE

-



Ang pambombang ito ay mayroong opsyong auto prime

[www.infinityfeedingpump.com](http://www.infinityfeedingpump.com)

MGA DIREKSYON SA PAGGAMIT / Gamitin ang mga Infinity Feeding Set lamang

1. Buksan ang pinto. Iposisyon ang silicone tubing sa palibot ng pump wheel na dahan-dahang binabatak. Ilagay ang cassette sa loob ng pump. Isara ang pinto.
2. Buksan ang pump gamit ang key na **ON/OFF**. Beripikahin ang lahat ng mga display segment at naririnig na alarma.
3. Kumpirmahin ang settings sa pamamagitan ng pagtingin sa/pag-aakma ng bilis, dosis, at uri ng pagkain.
4. Itakda ang bilis gamit ang mga key na + at -.
5. Pindutin ang key na **RATE/DOSE**. Itakda ang dosis gamit ang mga key na + at -.
6. Pindutin ang key na **FOOD TYPE**. Itakda sa formula o sa gatas gamit ang mga key na + at -.
7. Pindutin ang key na **VOL/TOTAL** para ipakita ang dami. Kung gusto, burahin lahat gamit ang key na **CLEAR**. Pindutin muli ang key na **VOL/TOTAL** para ipakita ang kabuuang dami. Kung gusto, burahin lahat gamit ang key na **CLEAR**.
8. Pindutin ang matagal ang key na **PRIME** para punan ng fluid ang set. Bitawan ang key na **PRIME** kapag napuno na. Tandaan: Ang pambombang ito ay mayroong opsyong auto prime. Tingnan ang Manwal ng Opereytor para sa mga detalye.
9. Pindutin ang key na **RUN/PAUSE** para paandarin. Pindutin muli para sandaling itigil.
10. Pindutin ang key na **ON/OFF** para patayin (kapag nakapatay na, pinapanatili ng pump ang bilis, dosis, agwat ng pagpapakain, at kabuuang dami).
11. I-recharge ang baterya gamit ang Infinity AC Adapter / Charger lamang.

**MGA ALARMA** (Sumangguni sa Manwal ng Operator para sa mga karagdagang detalye)

- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE** - Kumpirmahin na naka-programa nang tama ang dosis at uri ng pagkain
- **LOAD SET** - Ang set ay hindi nakargahan nang tama (kargahan muli)
- **LOW BATT** - Mahina na ang baterya (isaksak sa AC Adapter / Charger)
- **MAX** - Naabot na ang limitasyon ng dosis at naka-programang bilis
- **NO FLOW IN / OUT** - May harang ang daanan ng fluid (alisin ang harang)
- **NO FOOD** - Walang laman ang bag o set (muling punan)
- **PUSH RUN TO FEED** - Ang pump ay hindi ginamit sa loob nang higit pa sa 2 minuto (paganahin o patayin)
- **SHUT DOOR** - Nakabukas ang pinto
- **ER01 - ER99** - (Patayin ang pump at pagkatapos ay buksan; kapag bumalik ang error, ipaayos)



Makipag-usap nang live sa isang Moog Clinical Representative 24 oras bawat araw, 7 araw bawat linggo sa **800.970.2337**

**MOOG**® Enhancing Healthcare. Enriching Lives.™

Ang Infinity® at Infinity® Orange® ay mga rehistradong tatak-kalakal ng ZeveX, Inc. Ang Moog® ay isang rehistradong tatak-kalakal ng Moog, Inc. © 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 ZeveX Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA. LS-80673-010 Rev. B