


## 일회용 세트 프라이밍 및 로딩

이 지침은 작동 설명서로 적합하지 않습니다. 펌프를 작동하기 전에 작동 설명서 전체를 주의하여 읽어야 합니다. 펌프 작동 지침은 뒷면을 참조하십시오.


### 1단계

- Infinity 스파이크 세트를 사용하는 경우, 커넥터의 보호용 커버를 제거하고 커넥터 팁을 경장영양액 용기의 호환 가능한 포트에 삽입하십시오(그림 A). 나사산 구성품을 함께 단단히 조여서 커넥터를 고정하십시오.
- 500mL 또는 1200mL 일회용 세트를 사용하는 경우, 백의 깔때기를 수직상태로 유지하고 급식영양액을 부으십시오. 캡을 단단히 닫은 후 백을 거십시오(그림 B).

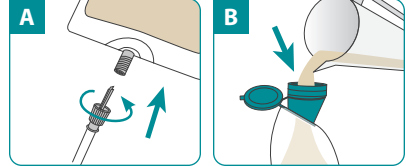

### 2단계


급식관의 커넥터에서 보호용 커버를 제거하십시오 (그림 C).

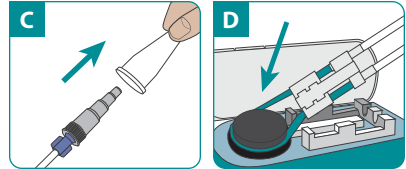

### 3단계 - 프라이밍

**펌프 프라이밍의 경우:** 실리콘 튜브가 약간 늘어나게 하면서 펌프 바퀴 주변을 감으십시오. 카세트를 펌프 내에 배치하고 문을 닫으십시오(그림 D).

펌프에서 빠 소리가 날 때까지 **ON/OFF(켜기/끄기)** 키를 누른 상태를 유지하여 펌프를 켜십시오(그림 E). 그런 다음, 영양액이 급식관 커넥터에 도달할 때까지 **PRIME(프라이밍)** 키를 누른 상태를 유지하십시오(그림 F).

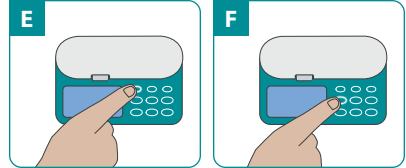


**수동 프라이밍의 경우:** "0" 기호 아래의 청록색

튜브를 부드럽게 꼭 집으십시오(그림 G). 액체 흐름에 도움이 되도록, 튜브를 꼭 잡은 동시에 백을 부드럽게 꼭 쥐십시오. 영양액이 급식관 커넥터에 도달할 때까지 이 상태를 유지하십시오.

실리콘 튜브가 약간 늘어나게 하면서 펌프 바퀴 주변을 감으십시오. 카세트를 펌프 내에 배치하십시오(그림 D). 펌프 문을 닫으십시오.

**배낭을 사용하는 경우:** 백 아래위가 거꾸로 되도록 뒤집은 후, 공기가 튜브 포트에 유입되도록 백을 기울이십시오(그림 H). "0" 기호 아래의 청록색 튜브를 부드럽게 꼭 집으십시오(그림 G). 액체 흐름에 도움이 되도록, 튜브를 꼭 잡은 동시에 백을 부드럽게 꼭 쥐십시오. 영양액이 급식관 커넥터에 도달할 때까지 이 상태를 유지하십시오.

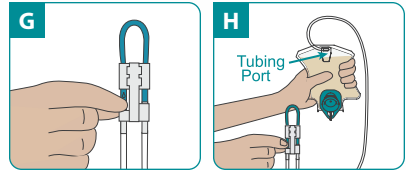


펌프에 대한 질문이나 문제해결 안내를 위해 하루 24시간 주 7일 Moog 직원과 직접 통화할 수 있습니다.

임상 및 고객 지원 **800.970.2337**

추가 정보는 [infinityfeedingpump.com](http://infinityfeedingpump.com) 을 방문하십시오

## 펌프 프로그래밍 및 유동

이 지침은 작동 설명서로 적합하지 않습니다. 펌프를 작동하기 전에 작동 설명서 전체를 주의하여 읽어야 합니다. 펌프 작동 지침은 뒷면을 참조하십시오.

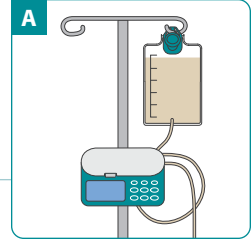

주입 용기 걸기	백의 맨 아랫 부분이 펌프 문 높이 이상이 되도록 주입 용기를 거십시오(그림 A).	
펌프 켜기	ON/OFF(켜기/끄기) 키를 누른 상태를 1.5초 동안 유지하여 펌프를 켜십시오. 마지막으로 프로그래밍된 유속이 디스플레이에 표시됩니다.	
유속(펌프 유동 속도) 프로그래밍하기	RATE/DOSE(유속/용량) 키를 누르면 화면의 왼쪽 아랫 부분에 "RATE(유속)"이 표시됩니다. 유속을 프로그래밍하려면 + 및 - 키를 사용하십시오.	
용량(주입되는 양) 프로그래밍하기	RATE/DOSE(유속/용량) 키를 누르면 화면의 왼쪽 아랫 부분에 "DOSE(용량)"가 표시됩니다. 용량을 프로그래밍하려면 + 및 - 키를 사용하십시오. 참고: 디스플레이에 "FEED INTERVAL(주입 간격)"이 표시된 경우, FEED INT(주입 간격) 키를 누른 다음 CLEAR(지우기) 키를 눌러서 주입 간격을 지우십시오.	
지속적 주입 프로그래밍하기 (유속만 해당하는 설정)	디스플레이에 "FEED INTERVAL(주입 간격)"이 표시된 경우, FEED INT(주입 간격) 키를 누른 다음 CLEAR(지우기) 키를 눌러서 주입 간격을 지우십시오. RATE/DOSE(유속/용량) 키를 두 번 누르면 화면의 왼쪽 아랫 부분에 "DOSE(용량)"가 표시됩니다. 디스플레이에 INF(무한)이 표시될 때까지 + 키를 누른 상태를 유지하십시오.	
간격 주입(또는 간헐적 주입) 프로그래밍하기	RATE/DOSE(유속/용량) 키를 누르면 화면의 왼쪽 아랫 부분에 "DOSE(용량)"가 표시됩니다. 용량을 프로그래밍하려면 + 및 - 키를 사용하십시오. FEED INT(주입 간격) 키를 누르면 화면의 왼쪽 아랫 부분에 "FEED INTERVAL(주입 간격)"이 표시됩니다. + 및 - 키를 사용하여 원하는 시간과 분 수를 프로그래밍하십시오.	
펌프 시작하기	RUN/PAUSE(유동/일시 중지) 키를 누르면 펌프가 시작됩니다.	
주입이 완료된 경우	주입이 완료되면, ON/OFF(켜기/끄기) 키를 1.5초 동안 눌러서 펌프를 끄십시오.	
설정 지우기	CLEAR(지우기) 키를 누르면 표시된 설정이 초기화됩니다. CLEAR(지우기) 키를 3초 동안 누른 상태를 유지하면 유속, 용량, 주입 간격 및 주입량 설정이 동시에 초기화됩니다.	
주입량 보기	VOL/TOTAL(주입량/총 주입량) 키를 한 번 누르면 현재 주입에서 공급된 주입량이 표시됩니다. 키를 한 번 더 누르면 마지막으로 총 주입량이 재설정된 이후 주입된 총 누적량이 표시됩니다.	