

NO FOOD Alarm (HAKUNA KENGELE ya Chakula) - Ikiwa uwekaji mpya wa seti ya pampu ya utoaji inahitajika, inashauriwa kutenganisha waya wa kuingiza umeme kwenye tyubu ya kulisha mgonjwa wakati wa kuianzisha tena.		
Je mfuko wa seti ya pampu ya utoaji haina kitu?	NDIO ▶	Weka chakula kwenye mfuko, sahihisha seti ya utoaji na anzisha ulishaji.
▼ HAPANA ▼		
Je kuna hewa kwenye tyubu?	NDIO ▶	Je hewa imeondolewa kutoka kwenye mfuko wa seti ya pampu ya utoaji?
	HAPANA ▶	Tayarisha tyubu kwa kumimina kwa mikono kwa kugeza mfuko juu chini, ukiminya taratibu nusu ya chini ya mfuko huku ukibana neli ya rangi ya hudhurungi chini kidogo "O" ya alama ya tone. Shikilia hivi mpaka hewa yote iondoke kwenye mfuko na tyubu.
	NDIO ▶	Bonyeza na ushikilie kitufe cha <b>PRIME (KUANZISHA)</b> ili kusogeza hewa kwenye tyubu ya seti ya pampu ya kulishia na uanze kulisha.  DOKEZO: Ikiwa pampu yako imewekwa chaguo kuu la kiotomatiki, rejelea Mwongozo wa Mtuamaji wa maelezo.
▼ HAPANA ▼		
Je, mchanganyiko umesagwa au umechanganywa kwa nguvu?	NDIO ▶	Acha mchanganyiko ukae kwa dakika 10-15 kabla ya kuandaa seti ya pampu ya kulishia. Ikiwa povu litakuwepo kwenye tyubu, suuza kwa kusambaza seti ya pampu ya kulishia kwa mikono au pampu na anzisha ulishaji.
▼ HAPANA ▼		
Je, hewa imenaswa ndani ya kaseti?	NDIO ▶	Ondoa tyubu kutoka kwa pampu na tayarisha tyubu kwa kutumia mikono kugeza mfuko juu chini, ukiminya taratibu nusu ya chini ya mfuko huku ukibana tyubu ya rangi ya hudhurungi chini ya alama ya kushuka. Shikilia kwa mkao huu mpaka hewa iondoke kupitia sehemu ya ya bluu ya tyubu.
	HAPANA ▶	<b>Ikiwa kengele itaendelea, wasiliana na Huduma za Usaidizi za Moog kwenye 800.970.2337 kwa usaidizi.</b>

LOAD SET Alarm (KUWEKA KENGELE)		
Je mlango umefungwa vizuri?	HAPANA/SINA UHAKIKA ▶	Zima pampu. Pakua na pakia kaseti ya seti ya ulishaji. Hakikisha mlango umefungwa vizuri, kisha washa tena pampu.
▼ NDIO ▼		
Je, mlango umepasuka au kichupo cha kando ya mlango kimevunjwa?	NDIO ▶	<b>Ikiwa kengele itaendelea, wasiliana na Huduma za Usaidizi za Moog kwenye 800.970.2337 ili kuagiza mlango mpya.</b>
	HAPANA ▶	<b>Ikiwa kengele itaendelea, wasiliana na Huduma za Usaidizi za Moog kwenye 800.970.2337 kwa usaidizi.</b>

Kengele za ER01 - ER99		
Je mlango wa pampu ulikuwa wazi wakati pampu ilikuwa imewashwa au ikifanya kazi?	NDIO/SINA UHAKIKA ▶	Zima pampu Pakua na pakia kaseti ya seti ya ulishaji. Hakikisha mlango umefungwa vizuri, kisha washa tena pampu.
	HAPANA ▶	<b>Ikiwa kengele itaendelea, wasiliana na Huduma za Usaidizi za Moog kwenye 800.970.2337 kwa usaidizi.</b>



Ongea moja kwa moja na Mwakilishi wa Kliniki wa Moog kwa maswali ya pampu na mwongozo wa utatuzi saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki.

Usaidizi wa Kliniki na Wateja **800.970.2337**

Tembelea [infinityfeedingpump.com](http://infinityfeedingpump.com) kwa maelezo zaidi

**MOOG**®

Enhancing Healthcare.  
Enriching Lives.™

NO FLOW IN or NO FLOW OUT Alarm (Kengele ya HAKUNA KINACHONGIA au HAKUNA KINACHOTOKA)		
NO FLOW IN (HAKUNA KINACHOINGIA): Kizuizi kati ya seti ya utoaji na pampu. NO FLOW OUT (HAKUNA KINACHOTOKA): Kizuizi kati ya pampu na mgonjwa.		
Je, bomba la seti ya utoaji limebanwa au kukunjwa?	NDIO ▶	Angalia seti ya utoaji kama limebanwa au kujikunja kwenye bomba na anzisha ulishaji.
▼ HAPANA ▼		
Je, kichupo cha ndani ya mlango kimevunjwa?	NDIO ▶	Wasiliana na Huduma za Usaidizi za Moog kwenye 800.970.2337 ili kuagiza mlango mpya.
▼ HAPANA ▼		
Je, eneo la sensa ya shinikizo la chombo cha kaseti ni safi?	HAPANA ▶	Safisha eneo la sensa ya shinikizo kwa kutumia pamba, kitambaa laini au sponji yenye maji; au osha pampu yote kwa maji yanayotiririka, Usitumie vifaa vya kukwangua au kemikali kali.
▼ NDIO ▼		
Je, kuna dalili zinazoonekana za uharibifu wa eneo la sensa ya shinikizo?	NDIO ▶	Wasiliana na Huduma kwa Wateja wa Moog kwenye 800.970.2337 ili kurudisha pampu kwa ajili ya ukarabati
	HAPANA ▶	Ondoa seti ya ulishaji toka mgonjwa. Bonyeza kitufe cha <b>RUN (ENDESHA)</b> ufunguo. Ikiwa pampu inatoa chakula bila kengele, angalia tyubu wa ulishaji mgonjwa kwa uharibifu.  Ikiwa kengele itaendelea, ondoa seti kwenye pampu, kisha taratibu fikicha "0" alama ya tone, kisha weka kwa mikonohadi kizuizi kitakapoondolewa na mchanganyiko uendelee kutoka kupitia tyubu. Badilisha seti na anzisha tena ulishaji.  <b>Ikiwa itashindwa kutoa mchanganyiko kupitia tyubu au kengele ikiendelea, wasiliana na Huduma kwa Wateja wa Moog kwenye 800.970.2337 kurudisha pampu kwa usaidizi.</b>  <i>*Dokezo: Usitumie kitufe cha <b>PRIME (KUANZISHA)</b> kusuluhisha au kutatua kengele hizi.</i>

Matatizo ya Kuchaji		
Je, chaja ya A/C imewekwa vizuri ukutani na kwenye pampu?	HAPANA/SINA UHAKIKA ▶	Angalia muunganisho wa ukutani na kwenye chaji ya pampu. Mwangaza wa kiashirio wa kijani kwenye plagi ya ukutani ya chaja unapaswa kuangazwa na onyesho la pampu liwe na alama ya plagi yenye pau za kusogeza kati ya E na F ya geji ya mafuta. Pindi pampu itakapojaa chaji, baa zitaacha kusogea.
▼ NDIO ▼		
Je, chaji ya ukutani inafanya kazi vizuri?	HAPANA/SINA UHAKIKA ▶	Chomeka kifaa kingine kwenye soketi ili kuthibitisha kama inafanya kazi vizuri.
▼ NDIO ▼		
Je, chaja inaonyesha ina hitilafu yoyote?	NDIO ▶	Wasiliana na Huduma za Wateja wa Moog kwenye 800.970.2337 ili kuagiza chaja mpya.
▼ HAPANA ▼		
Je, lango la chaja linaonekana kuwa na uharibifu wowote ikiwa ni pamoja na pini zilizopinda au kutokuwepo?	NDIO ▶	Wasiliana na Huduma za Wateja wa Moog kwenye 800.970.2337 ili kurudisha pampu kwa ajili ya ukarabati.
▼ HAPANA ▼		
Je, Alama ya Betri na E na F ya geji ya mafuta inaangaza?	NDIO ▶ HAPANA ▶	Wasiliana na Huduma za Wateja wa Moog kwenye 800.970.2337 ili kurudisha pampu kwa ajili ya ukarabati.